

# maskitalia

 MADE IN ITALY

## ISTRUZIONI PER L'USO – ITALIANO

MaskItalia mascherine filtranti fabbricate in Italia e distribuite da Sungal Srl, Via Cavour 18/B, Crema (Cr), prodotte in deroga a norma del Decreto Curaitalia.

## DESCRIZIONE

- Le mascherine non sono certificate secondo il sistema di classificazione FFP (filtering face piece) e non sono un presidio medico ma, limitando la diffusione delle goccioline respiratorie (c.d. DROPLET), possono contribuire a ridurre la diffusione del contagio, proteggendo noi stessi e le persone intorno a noi.
- È responsabilità dell'utilizzatore assicurarsi che la mascherina filtrante fornisca l'adeguato livello di protezione contro il tipo e la concentrazione dei contaminanti nell'ambiente dove deve essere utilizzato.
- Le mascherine filtranti sono disponibili in tre diverse taglie in base alla grandezza del viso, per assicurare il massimo comfort e aderenza: la lunghezza della mascherina nella taglia S è di 33 cm, nella taglia M è di 35 cm e nella taglia L è di 37 cm. La misura è da intendersi comprensiva della mascherina e del laccio piegato. In qualunque caso anche la taglia più grande può essere facilmente adattata annodando l'elastico. Indicativamente la taglia S è adatta a ragazzi/donne, la taglia M a uomini di media/piccola corporatura e donne e la taglia Large a uomini di grande corporatura.

## AVVERTENZE

- L'utilizzatore deve essere addestrato al corretto utilizzo del dispositivo prima dell'impiego.
- Non modificare o alterare la mascherina filtrante.
- Le mascherine filtranti possono essere riutilizzate a seguito di lavaggio in lavatrice a 60°.
- La mascherina filtrante non protegge da gas e vapori per i quali è necessario l'impiego di dispositivi adeguati.
- Non usare in ambiente con insufficiente contenuto di ossigeno (< 17%).
- Non adatta in caso di deficit respiratorio, di qualsiasi natura esso sia.

## ISTRUZIONI PER INDOSSARE LA MASCHERINA FILTRANTE

- Lavarsi accuratamente le mani prima di impugnare la mascherina per indossarla.
- Impugnare il dispositivo con il palmo della mano mantenendo gli elastici esterni.
- Posizionare gli elastici dietro le orecchie.
- Assicurarci che naso e bocca siano coperti e che la mascherina sia perfettamente aderente al viso.
- Barba o baffi possono compromettere il corretto uso della mascherina.

